



使用手冊

DC 行動寵物加熱衣

DC to Go Pet Heating Vest

使用本產品之前，請詳閱使用手冊遵照使用。

型號： P-720

2 安全說明

3 打開包裝與確認

4 使用步驟與建議

4 規格

6 收納與維護

7 保固說明

安全說明

請務必遵循下列注意事項並詳細閱讀產品使用說明，使用前請先檢查本產品及配件，以避免危險狀況並確保產品發揮最佳效能，若有故障損壞應立即停止使用並連絡本公司處理。



警告使用者設備隨附文件中重要操作和維護（維修）指示。



絕緣隔離等級二。



使用前請參閱使用說明及注意事項。



若要丟棄，電池等各部位請依相關分類規定做廢棄處理。



注意事項

1. 本產品只設計供寵物使用。
2. 請勿用於初生小動物與懷孕的寵物。
3. 請勿超過原設計使用範圍使用。
4. 不建議在寵物睡眠或無意識狀況下使用。
5. 任何出現皮膚上的問題或有皮膚表面有傷口的寵物，請勿使用。
6. 使用中請隨時注意寵物狀況，若有表現出任何異常狀況，請立即關閉電源取下。
7. 若無法順利開啟電源，請先確認電池蓄電狀況，並更換電池。
8. 若有任何病理使用上的疑慮，都必須先諮詢獸醫同意後再使用。
9. 更換 / 取下電池時，請先關閉電源靜置一段時間後，待電池冷卻再取出。
10. 使用者若未依照產品說明書操作本產品，或非使用附屬之專用配件導致產品損壞及發生任何不可預期的意外傷害，使用者需自行負責。
11. 建議使用本產品時與微波爐及收音機保持距離，以避免機器受干擾。
12. 請勿坐、壓在寵物加熱衣上，或在身體潮濕狀況下使用。
13. 請勿於易燃、高溫潮濕或鄰近充滿氧氣的環境及氧氣儲存設備旁使用。
14. 使用時請勿以大頭針或任何金屬及尖銳物體固定，以避免觸電。
15. 當下若不繼續使用，請務必確認產品電源關閉並取下電池後再收存。

16. 請勿在不正常情況下使用或自行改裝或拆卸，以免發生使用危險，並喪失保固權益。
17. 請勿以強力壓折及扭曲方式使用或收納熱敷墊。
18. 主體與配件請勿收存在高溫潮濕的環境以避免產品鏽蝕或損壞。
19. 配件（電池盒）請勿大力碰撞或摔擊以免造成損壞。
20. 請勿置放在嬰幼兒容易取得或寵物可能會破壞的環境。
21. 若要丟棄，電池等各部位請依相關分類規定做廢棄處理。

打開包裝與確認

打開包裝

- 本產品以紙盒包裝，其中含有標準配件。
- 若有其他選購配件則另外包裝。
- 打開紙箱後，請確保內容物完好無缺。

包裝內容物


請核對包裝內是否有下列項目：

- 熱敷墊主體
- 電池盒（不含電池）
- 使用手冊
- 產品保固卡

P-720 |

註：

- 您可保留包裝紙盒或紙箱以及包裝材料，以便日後保固、搬運使用。
- AA 電池請選用符合台灣環保署規定汞含量核准的產品。

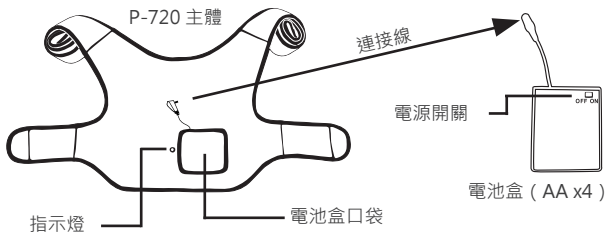

※ 示意圖，不代表產品本身與實際尺寸。

使用步驟與建議

燈號說明

- 電源連接上的瞬間，電池盒會亮燈即滅，是為過電指示，並非電源開啟，使用請按以下操作流程。
- 當電池盒燈號微弱 / 無燈號時，表示電池已無足夠電力 / 無電力驅動熱敷墊發熱，請更換新電池。

操作流程

1. 將 AA 電池共四顆安裝至電池電池盒內。
2. 將電池盒連接至熱敷墊接頭，再置入電池盒口袋內，以免電池盒掉落造成損壞。
3. 開啟 / 關閉電源：請將電池盒之電源開關移至 ON / OFF 位置。

警示

- 電源開啟時，請注意產品是否有正常啟動。(請參照燈號說明)
- 使用寵物加熱衣時，請隨時注意寵物是否有過度反應。

操作建議

- 使用時間建議為每次 30 分鐘，若要連續使用，請務必注意寵物是否有任何異常狀況。
- 使用中若要更換電池，請先從寵物身上取下再進行更換。抽換電池盒時，請由底部推出，方便拿取。

規格 - 若功能升級或調整，將另行公告於官網。


紅燈 ●
約 42 - 60 °C

由於加熱片面積大小、周圍環境等相關因素都會使溫度造成誤差值，此數據為抽檢樣品之發熱溫度範圍。

使用期限	排除天災、人為因素，在正常使用狀態最佳效期為 5 年。
材 質	NEOPRENE 尼奧普林
電池規格	AA 電池

型號	P-720 (S)	P-720 (M)
尺寸 (寬 x 高) 約	18 x 20 cm	26 x 23 cm
熱敷面積 (寬 x 高) 約	15 x 15 cm	19 x 19 cm
重量 約	110 g	150 g
輸出電壓	4.8 V 	4.8 V 
消耗功率	7 W	7 W
電池使用時間約	90 分鐘	60 分鐘
最大胸圍	20.5 英吋	29.0 英吋
最大腰圍	19.0 英吋	23.0 英吋

穿戴說明

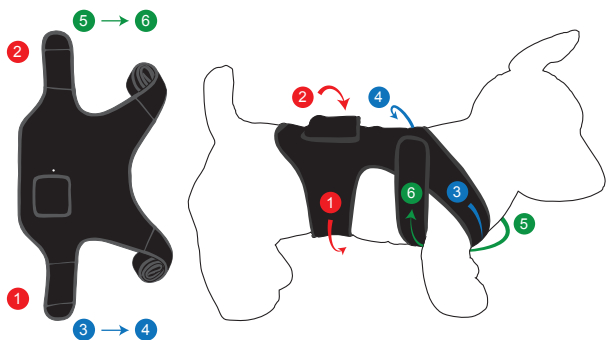

收納與維護

1. 使用完畢請將寵物加熱衣、配件及使用手冊妥善收納。
2. 建議寵物加熱衣至少每季通電操作一次。
3. 若使用者使用本產品一段時間，可能產生髒污、污漬，請依清潔建議方式及注意事項進行。

清潔寵物加熱衣

建議定期清潔熱敷墊，以維持最佳效能並延長產品使用壽命。

警示

- 請務必先關閉電源，並移除電池盒。
- 當寵物加熱衣閒置或未使用時，請將電池從電池盒取下，以避免因電池變質造成損壞。
- 請務必確保電源接頭處完全乾燥後再連接電池盒使用。

主體

1. 若要清除表面微塵（毛髮、棉絮等），可使用乾淨的膠黏紙滾筒於寵物加熱衣表面進行清潔。
2. 若要清除已附著在寵物加熱衣上之污漬，可使用手洗方式，並放置於陰涼通風處陰乾即可。

警示

- 請勿熨燙。
- 請勿使用漂白水或任何化學藥劑。
- 請勿使用洗衣機、脫水機、扭轉擰乾或甩乾，否則將造成產品損壞。
- 請勿使用任何熱烘乾的方法，以免寵物加熱衣脆化失去彈性。

保固說明

重要說明，請妥善保存並遵照說明使用。

- 收到全新商品時，請務必先檢查包裝是否完整及是否有缺件，如有問題應立即連絡購買處處理。
- 產品保固卡須有經銷商蓋章或有購買憑證始能享有保固服務，以上均應妥善保存以免影響保固權益。
- 產品保固卡若有塗改或與登載之產品型號不符者，將喪失保固權益。
- 保固期間為自購買日起算一年。
- 產品保固期內若有任何問題，請備經銷商蓋章之保固卡或購買憑證，委請經銷商處理。
- 若有下列情事發生者，將不列入保固範圍並酌收維護費用：
 1. 未依照產品說明書操作本產品，導致產品損壞者。
 2. 自行改裝或拆卸產品及配件部分，導致產品損壞者。
 3. 未使用原廠配件，導致產品損壞者。
 4. 因天災或任何不可抗拒之外力造成的損壞。
 5. 保固卡未蓋保固章或無法出示保固卡及購買憑證致無法判定購買資料者。
 6. 其他任何人為外在因素導致產品損壞者。
- 產品保固期過期後需要維修處理，請直接洽詢經銷商或產品客服中心。
- 為維護客戶權益，產品保固期過後的維修服務，客服人員將會先告知相關費用，待客戶端確認後再處理。
- 以上若有登載未盡或其他任何產品的問題，皆可直接洽詢服務專線，將有專人服務。

※ 本公司所有系列產品已投保 1000 萬的蘇黎世產品責任險

※ 本產品設計研發：美國 製造生產地：台灣



廠商資訊	
廠商名稱	速配鼎國際股份有限公司
廠商地址	710 台南市永康區和平東路 206 號 1 樓
廠商客服	06-2700123